



SZCZOTKA DO GOLARKI ORTOPEDYCZNEJ

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.

Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę w pojemniku sterylizacyjnym.

Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134°C przez 18 minut).

Nr kat.	Sztwność	Przybliżona częstotliwość wymiany	Zastosowanie
565	Średnia	2 miesiące	Golarka ortopedyczna