

Torebki HUMIPAK

Transport i przechowywanie zanieczyszczonych narzędzi w stanie wilgotnym

Niesterylne samoprzylepne torebki HUMIPAK przeznaczone są do transportu i przechowywania zanieczyszczonych narzędzi w stanie wilgotnym. Specjalna wiskozowa wkładka (do nawilżenia) utrzymuje wilgotność wewnątrz szczelnie zamkniętej torebki nawet do 7 dni.

Zanieczyszczone narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane zaraz po użyciu, do chwili końcowego czyszczenia. Torebki są jednorazowego użycia, umożliwiają szybsze i łatwiejsze czyszczenie zabezpieczonych narzędzi.

Torebki HUMIPAK:

- ✓ Są wytworzone z dwóch warstw folii (poliesterowej i polipropylenowej) oraz wysoce hydrofilowej niebieskiej wkładki wiskozowej.
- ✓ Nie są przeznaczone do sterylizacji.
- ✓ Nie zapewniają bariery mikrobiologicznej.

Na torebkach HUMIPAK są nadrukowane:


- ✓ Instrukcja użycia wraz z ilością wody potrzebnej do nawilżenia wiskozowej wkładki.
- ✓ Nr serii.
- ✓ Symbol Biohazard.




Teraz również dostępne do narzędzi chirurgii robotycznej!

NR KAT.	WYMIARY [mm]	ILOŚĆ WODY DO NAWILŻENIA WKŁADKI	OPAK. [szt.]
WM.HPSS2035	200 x 350	10 ml	100
WM.HPSS4243	420 x 430 (½ DIN)	30 ml	100
WM.HPSS4267	420 x 670 (1 DIN)	60 ml	100
WM.HPPS5667	560 x 670 (endoskopy)	75 ml	100
WM.HPSS6577	650 x 770 (2 x DIN)	90 ml	50
WM.HPSSR01	210 x 815	1 ramię robotyczne	100
WM.HPSSR04	420 x 815	4 ramiona robotyczne	100

Producent - Westfield Medical

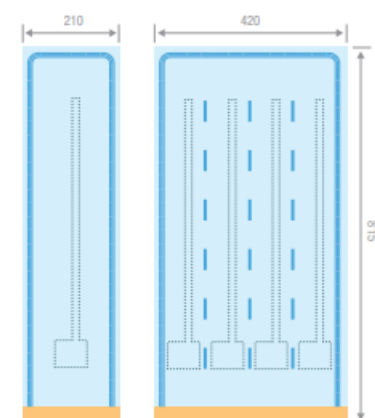

na 1 ramię / na 4 ramiona robotyczne

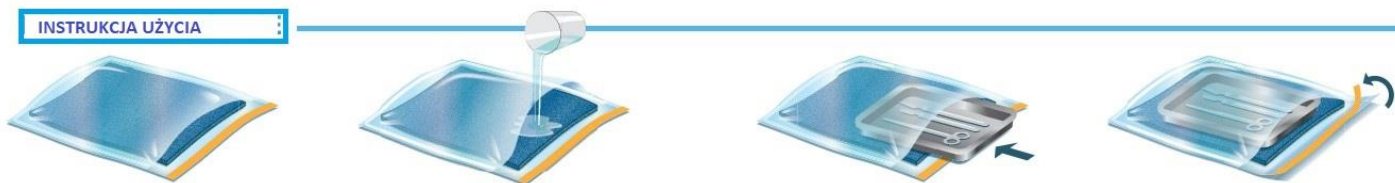**PRAWIDŁOWO****ODMIERZENIE ILOŚCI WODY**

Po wybraniu odpowiedniej torebki Humipak, należy odmierzyć ilość wody zgodnie z nadrukowanymi instrukcjami na torebce Humipak. Ważne jest, aby nie przekraczać podanej ilości wody.

**NAWILŻENIE WKŁADKI**

Należy nawilżyć wodą niebieską wkładkę wewnątrz torebki, PRZED umieszczeniem zestawu narzędziowego w torebce Humipak.

**NIE PRAWIDŁOWO****UMIESZCZENIE ZESTAWU**

Po nawilżeniu wkładki należy umieścić zestaw narzędziowy na niebieskiej wkładce wewnątrz torebki (folia na górze).

**ZAMYKANIE TOREBKI**

Torebkę z zestawem starannie zamykamy za pomocą paska samoprzylepnego. Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte. Torebka Humipak jest gotowa do transportu.

**OTWIERANIE TOREBKI**

Narzędzia mogą być przechowywane w torebce Humipak nawet przez 7 dni. Torebkę należy otwierać nożyczkami ze względu na mocny zgrzew.

**HUMIPAK DO ENDOSKOPÓW**

Torebki Humipak można używać do przechowywania endoskopów w stanie wilgotnym zaraz po użyciu, do chwili końcowego czyszczenia.



Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

STERIGAT 11.2023- Niniejszy materiał nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

www.sterigat.pl