

WSKAŹNIK ZINTEGROWANY – TYP 5 STERYLIZACJA PAROWA



nr kat. **LS.LCS51**
opak. 500 szt.

- **OPIS:**
Wskaźnik zintegrowany reaguje na wszystkie zmienne krytyczne procesu sterylizacji parowej. Kontroluje procesy w zakresie temperatur pomiędzy 121 °C i 135 °C. Daje wizualne potwierdzenie, że parametry sterylizacji (czas, temperatura oraz para) zostały spełnione.
- **NORMA:**
PN-EN ISO 11140-1
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).

- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**
Podczas procesu granulatu chemicznego topi się i przemieszcza w postaci czarnej barwy wzdłuż oznaczonych pól Reject (odrzuć) lub Accept (akceptuj).



Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 15-30 °C, wilgotność względna 40-60 %, z dala od światła, wilgoci i środków utleniających. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.