

## SMART-READ™ EZTest®

ZAMKNIĘTY SYSTEM WSKAŹNIKA BIOLOGICZNEGO  
STERYLIZACJA PAROWA - GETINGE ASSURED

- **OPIS:**  
Wskaźnik biologiczny Smart-Read do sterylizacji parą wodną. Zawiera populację  $10^5$  spor *Geobacillus stearothermophilus* ATCC7953 na fiolce.
- **NORMA:**  
PN-EN ISO 11138-1:2017  
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne).
- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**  
Odczyt nieprawidłowego cyklu po 3-5 godzinnej inkubacji w temp.  $60 \pm 2^\circ\text{C}$ . Wymagane 10 godzin inkubacji w inkubatorze Smart-Well.  
Po sterylizacji wskaźnik chemiczny na fiolce zmienia barwę z niebieskiej na czarną. Opakowanie 100 szt.  
Zmiana barwy pożywki bakteryjnej z koloru wyjściowego fioletowego na żółty oznacza nieskuteczność procesu.



nr kat. **G.504054100**  
Opak. 100 szt.



## INKUBATOR SMART-WELL

nr kat. **G.504054500**

Wyposażony w prosty ekran dotykowy, 10 cel na wskaźniki ze zintegrowaną kruszarką.

W zestawie termometr i drukarka do rejestracji danych.

Alarm ostrzega użytkownika o wykryciu wzrostu pożywki bakteryjnej.

Wynik procesu sterylizacji oparty na rzeczywistym odczycie biologicznym, a nie na prognozie enzymatycznej.

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl