

STERIPRO – System dokumentacji sterylizacji


System STERIPRO to pełna informacja o parametrach cyklu sterylizacji gromadzona w jednej kopercie służącej za protokoły kontroli zarówno sterylizatora jak i poszczególnych jego cykli w każdym dniu, umożliwiającą identyfikację każdego sterylizowanego pakietu z cyklem sterylizacji, podczas którego pakiet ten był sterylizowany oraz możliwością wklejenia etykiety odklejonej z wysterylizowanego pakietu w karcie pacjenta.

W skład systemu wchodzi:

1 **Koperta SteriPro** z nadrukiem ułatwiającym sprawne zaprotokołowanie codziennych rutynowych kontroli zarówno sterylizatora (test Bowiego-Dicka, test szczelności), jak i każdego z cykli.

- Liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie – 16 (7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty).
- Na kopercie przewidziano miejsce na wklejenie:
 - a. podwójnie samoprzylepnej etykiety,
 - b. wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu,
 - c. wskaźnika z PCD systemu Helix,
 a także miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność.

Symbol **S.STERIPRO**

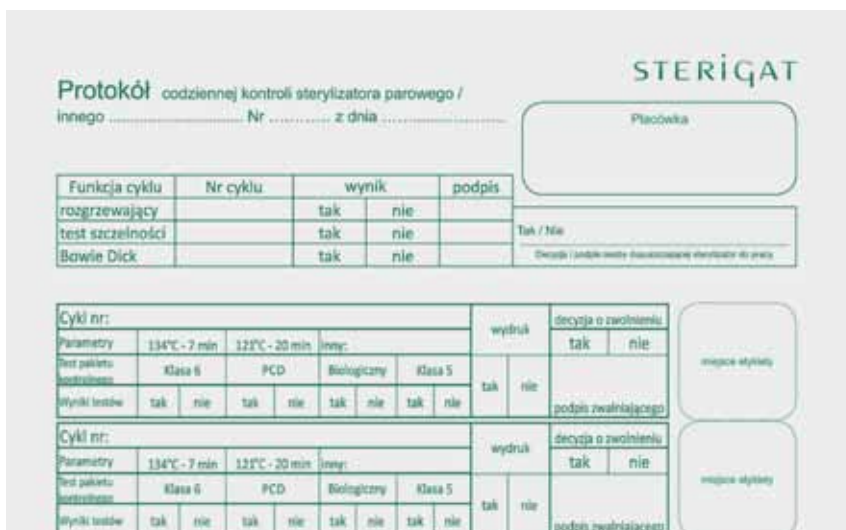

Protokół codziennej kontroli sterylizatora parowego / innego Nr z dnia

Placówka

Funkcja cyklu	Nr cyklu	wynik		podpis
rozgrzewający		tak	nie	
test szczelności		tak	nie	
Bowie Dick		tak	nie	

Tak / Nie

Decyzja (zgodnie z procedurą) sterylizatora do pracy

Cykl nr:	Parametry								wynik		decyzja o zwolnieniu		miejsce etykiety
	134°C - 7 min	122°C - 20 min	inne:		tak	nie	tak	nie	tak	nie			
rodzaj pakietu / test szczelności	Klasa 6	PCD	Biologiczny		Klasa 5								
Wyniki testów	tak	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	podpis zwalniającego		

Cykl nr:	Parametry								wynik		decyzja o zwolnieniu		miejsce etykiety
	134°C - 7 min	122°C - 20 min	inne:		tak	nie	tak	nie	tak	nie			
rodzaj pakietu / test szczelności	Klasa 6	PCD	Biologiczny		Klasa 5								
Wyniki testów	tak	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	tak	nie	podpis zwalniającego		

Dostępne są różne wzory kopert (w tym też bez miejsc na wklejenie testów klasy 6 na zewnątrz koperty o symbolu S.STERIPRO 2)

2 Etykiety podwójnie samoprzylepne

o sześciu polach zakodowanej informacji z nadrukowanym wskaźnikiem sterylizacji parowej STEAM Klasy 1 wg PN EN ISO 11140

- data sterylizacji – 8 znaków
- data ważności – 8 znaków
- nr sterylizatora – 2 znaki
- nr cyklu – 4 znaki
- kod operatora – 2 znaki
- symbol pakietu: trzy znaki cyfrowe



Symbol	Opis (etykiety podwójnie samoprzylepne)	Liczba etykiet na rolce	Liczba rolek w opakowaniu zbiorczym	Liczba pól informacyjnych
S.ETYKIETA	Etykieta bez wskaźnika	500	30	6
S.ETY3PARA	Etykieta ze wskaźnikiem STEAM	500	30	6

3 **Metkownica alfanumeryczna** trzyrzędowa umożliwiająca ustawienie zakodowanych numerycznie różnych informacji, drukowanie tych informacji w zaplanowanych sześciu polach na etykietach o wymiarach 28 x 29 mm i naklejanie zadrukowanych etykiet na pakietach lub pojedynczych torebkach. Drukowanie etykiet w trzech rzędach w kierunku poprzecznym do rozwijania taśmy.

Symbol: **PR.MET32928**



System STERIPRO stanowi pełny sposób udokumentowania zarówno wprowadzenia procedur kontrolowania sterylizacji jak i ich codziennego stosowania, a także zapis czynności wykonanych w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu w procesie sterylizacji.