



SZCZOTKI DO DELIKATNEGO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

Do wyjątkowo delikatnego czyszczenia sprzętu, takiego jak urządzenia mikrochirurgiczne lub okulistyczne idealna jest szczotka 430 posiadająca miękkie włókna, które zapewniają skuteczne czyszczenie nawet drobnych i bardzo delikatnych narzędzi. Niewielki rozmiar szczotki z łatwą do trzymania, miękką rączką zapewnia maksymalną kontrolę i ułatwia czyszczenie.

PROCEDURA DEZYNFEKCJI

Odkaż i opłucz po każdym użyciu.

Maksymalna liczba sterylizacji: 60 cykli.

Odpowiednia do mycia w myjni dezynfektorze i wysterylizowania - umieść szczotkę w pojemniku sterylizacyjnym.

Wysterylizuj szczotkę identycznie jak przy sterylizacji wyrobów medycznych (do 134 °C przez 18 minut).

| Nr kat. | Sztywność | Przybliżona częstotliwość wymiany | Zastosowanie |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 430/2 | Miękkie włókna | 2 miesiące | Delikatne czyszczenie |
| 410/2 | Sztywne włókna | 3 miesiące | Intensywne czyszczenie |