

TOREBKI HUMIPAK

TRANSPORT ZANIECZYSZCZONYCH NARZĘDZI W STANIE WILGOTNYM

Torebki HUMIPAK z zamknięciem samoprzylepnym do transportu i przechowywania zanieczyszczonych narzędzi w stanie wilgotnym.

Specjalna wiskozowa wkładka (do nawilżenia) utrzymuje wilgotność wewnątrz szczelnie zamkniętej torebki nawet do 7 dni. Zanieczyszczone narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane zaraz po użyciu, do chwili końcowego czyszczenia.

Niesterylne torebki jednorazowego użycia.

Instrukcja użycia jest nadrukowana na torebce. (również ilość wody potrzebna do nawilżenia wkładki)



NR KAT.	WYMIARY [mm]	IŁOŚĆ WODY DO NAWILŻENIA WKŁADKI	OPAK. [szt.]
WM.HPSS2035	200 x 350	10 ml	100
WM.HPSS4243	420 x 430 (½ DIN)	30 ml	100
WM.HPSS4267	420 x 670 (1 DIN)	60 ml	100
WM.HPPS5667	560 x 670 (endoskopy)	75 ml	100
WM.HPSS6577	650 x 770 (2 x DIN)	90 ml	50

Sterigat Sp. z o.o.

Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa, tel. + 48 22 379 71 60, e-mail: sterigat@sterigat.pl

DOBRE



ODMIERZENIE ILOŚCI WODY

Po wybraniu odpowiedniej torebki Humipak, należy odmierzyć ilość wody zgodnie z nadrukowanymi instrukcjami na torebce Humipak. Ważne jest, aby nie przekraczać podanej ilości wody.



NAWILŻENIE WKŁADKI

Należy nawilżyć wodą niebieską wkładkę wewnątrz torebki, **PRZED** umieszczeniem zestawu narzędziowego w torebce Humipak.



UMIESZCZENIE ZESTAWU

Po nawilżeniu wkładki należy umieścić zestaw narzędziowy na niebieskiej wkładce wewnątrz torebki (folia na górze).



ZAMYKANIE TOREBKI

Torebkę z zestawem starannie zamykamy za pomocą paska samoprzylepnego. Opakowanie powinno być szczelnie zamknięte. Torebka Humipak jest gotowa do transportu.



OTWIERANIE TOREBKI

Narzędzia mogą być przechowywane w torebce Humipak nawet przez 7 dni. Torebkę należy otwierać nożyczkami ze względu na mocny zgrzew.



HUMIPAK MOŻNA UŻYWAĆ RÓWNIEŻ DO ENDOSKOPÓW

Torebki Humipak można używać do przechowywania endoskopów w stanie wilgotnym zaraz po użyciu, do chwili końcowego czyszczenia.



ŹLE

